

スズキセニアカー

運転免許を返納したら、次の乗りもの。

セニアカーは歩行者として扱われます。

セニアカーは非課税で消費税はかかりません。

免許は必要ありません。

電気で動きます。

手軽に操作できます。

歩道を通行します。

メーカー希望
小売価格 ※2 **368,000円**

308,000円

378,000円



歩くようなスピード

前進時の最高速度は時速1km~6kmの範囲で、設定可能です。



曲がる時は自動で減速

時速4.5kmを超える速度で走行する場合、ハンドルを切った角度に応じて自動的に時速4.5kmまで減速します。



握り込み緊急停止機能

危険を感じて、アクセルレバーを強く握りしめてしまった場合、安全のため急停止します。

*通常時のブレーキとして使用しないでください。

音声案内



●傾斜お知らせ機能

センサーが登り坂や下り坂だけでなく、左右の傾きも感知。表示灯や音声・ブザーでお知らせします。



●各種お知らせ機能

後進や右左折、充電状態をお知らせする案内、誤操作や異常などを警告する機能です。



音声案内



●傾斜お知らせ機能

センサーが登り坂や下り坂だけでなく、左右の傾きも感知。表示灯や音声・ブザーでお知らせします。



●各種お知らせ機能

後進や右左折、充電状態をお知らせする案内、誤操作や異常などを警告する機能です。

充実の快適装備



●各種表示灯

定期点検、傾斜注意、充電案内、バッテリー残量を表示します。



●バスケット・買い物フック

お出かけに便利です。
*バスケットは重量3kg、買い物フックは重量1.5kgの範囲内でご使用ください。

見やすく操作しやすいハンドルまわり



手軽に操作できます・使い方

電源を入れます

鍵を差しこんで右にひねり、「入」または「O」(点灯)にすると、電源スイッチが入った状態になります。



発進と停止の操作について

ハンドル内側のアクセルレバーを押し下げればモーターが作動して動き出します。そして手を放せば、アクセルレバーが元の位置に戻り、自動でブレーキがかかります。セニアカーはレバー一本で、アクセルとブレーキの操作ができます。



(押し下げると動き出す)



(放すとブレーキがかかる)

最高速度の設定について

セニアカーのスピードは、アクセルレバーを下に押し下げる角度で調整します。一番下まで押し下げると最高速度になります。最高速度はハンドルの中央部にあるダイヤルで調整します。時速1km~6kmの間で調整できます。



前進・後進の切り替え方について

進行方向の切り替えレバーを使ってバックする事もできます。前に進む場合はレバーを前に、後ろに進む場合は後ろにレバーを切り替えます。
*後進時の最高速度は時速2kmです。



株式会社 **橋爪自動車商会**
〒022-0002 岩手県大船渡市大船渡町字地ノ森30番地5
TEL0192-27-7227 FAX0192-27-2090